

GUIA DO USUÁRIO

ADESIVO TRANSCUTÂNEO DESCARTÁVEL STP

Modelos:

SE-001810 - Adesivo Transcutâneo Descartável STP Pequeno: 5,5 x 5,5 cm

SE-001820 - Adesivo Transcutâneo Descartável STP Médio: 6,0 x 12,0 cm

SE-001830 - Adesivo Transcutâneo Descartável STP Grande: 8,0 x 15,0 cm
2 unidades de adesivo transcutâneo são acopladas em um saco plástico.

Indicação de uso/ Finalidade:

Indicado para o tratamento e alívio da dor, através da radiofrequência pulsada STP no modo transcutâneo. Projetado para trabalhar em conjunto com o Gerador de Radiofrequência Pulsada. A aplicação é limitada a grandes articulações (pé, tornozelo, joelho, quadril, ombro, braço, cotovelo, punho e mão).

Condições para armazenamento e transporte:

- Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar direta e de agentes corrosivos. A temperatura do local deve estar entre -10°C e +45°C e umidade relativa <80%. O produto pode ficar armazenado até a sua data de validade;
- Não coloque sob a embalagem pesos ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as características técnicas do produto e comprometer a integridade da embalagem;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada e deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.

Condições para operação:

- Deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados, habilitados e treinados.
- Sua embalagem deve ser aberta apenas no momento pretendido ao uso.
- Antes de sua abertura, verifique a integridade da embalagem, garantindo que a mesma não esteja com prometida. Caso a embalagem esteja danificada/violada, não utilize o produto.
- Evite qualquer tipo de ação que possa danificar o produto, tais como queda, torção, impacto ou esmagamento, devido ao risco de comprometimento de seu funcionamento.

Advertências/ Precauções:

- Leia atentamente todas as instruções antes de usar, incluindo todos os tipos de adesivo transcutâneo descartável.
- O adesivo transcutâneo só pode ser usado na superfície da pele de acordo com as instruções.
- Uso único, proibido reprocessar.
- Todo adesivo transcutâneo deve ser usado na superfície da pele, certifique-se de que a área da pele esteja limpa, sem pelos (ou remova os pelos), sem caspa, sem cicatriz, livre de infecções.
- O adesivo transcutâneo é descartável e não pode ser reutilizado.
- Quaisquer embalagens, adesivos e cabos danificados e quebrados devem ser descartados, componentes danificados podem resultar em ferimentos ao paciente ou ao operador.
- O produto não deve ser utilizado se a data de validade presente no rótulo estiver expirada;

Cuidado: Nunca mergulhe quaisquer conectores e adesivo transcutâneo em qualquer líquido.

Contraindicações:

- Não foram encontradas contraindicações para o uso do produto.

Instrução de uso:

- Rasgue a embalagem e retire o adesivo transcutâneo com cuidado.
- Descubra o papel de liberação e aplique o adesivo transcutâneo na pele.
- Inspeção o fio condutor e o adesivo quanto a danos.
- Conecte o fio condutor do adesivo transcutâneo a máquina diretamente ou use o cabo adaptador e o cabo de extensão para conectar.













Segurança e Eficácia do Produto:

Produto totalmente seguro se utilizado por profissional habilitado e respeitando as especificações de uso descritas neste documento;
O não cumprimento dessas instruções causa o uso incorreto do dispositivo, configurando mau uso e potencializando os riscos para o paciente;
Em caso de dúvidas ou problemas, consulte sempre a SOLLIEVO.

Descarte:

O descarte dos componentes deve ser realizado conforme o procedimento e normativas vigentes, assim como os requisitos presentes na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018.

Símbolos utilizados:

	Cuidado
	Não reutilizar
	Data de fabricação
	Lote
	Data de validade
	Fabricante
	Não reesterilize
	Não use se o pacote estiver danificado
	Mantenha longe da luz solar
	Conservar em local seco / Longe de umidade.
	Risco Biológico
	Limites de temperatura máxima e mínima de armazenamento.



Registro ANVISA: 81022039006

Fabricante: Shenzhen Kaborui Electronics Co.,Ltd
2F Building B, Xinhuatong Ind. Park, Shiyan town, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China 518108

Detentor da Notificação: Solлиево Medicina Especializada Ltda – Rua Alegre, 470 conj 406 e 1303 – Santa Paula – São Caetano do Sul – SP – CEP 09550-250
Contato: 4221-2170